

DEUTSCH

Generelle Reinigungshinweise

Alle medizinischen Geräte von R82 sollten in regelmäßigen Abständen gereinigt werden, um eine einwandfreie Hygiene und Funktionalität zu gewährleisten.

Die Anforderungen an die Reinigung hängen von Verwendungsart und Verwendungsumfeld des Produkts ab.

Für die Reinigung eines medizinischen Geräts ist ausschließlich sein Besitzer verantwortlich. Die Unterlassung der Reinigung kann zum Verlust der Gerätegarantie führen sowie klinischen Zustand und Sicherheit von Nutzern und/oder Betreuern beeinträchtigen.

Achtung! Alle hier aufgeführten Richtlinien sind lediglich Richtwerte. Die Reinigungsanweisung in der Gebrauchsanweisung jedes R82 Produkts und/oder der Wiedereinsatzanleitung haben in jedem Fall Vorrang.

Reinigung nach Material

Pulverbeschichtete Teile, Edelstahl, Kunststoff und PU: mit in pH-neutraler Mischung aus warmem Wasser und scheuermittelfreiem Reinigungsmittel aus-gewrungenen Lappen abwischen. Etwaige Rückstände mit trockenem, fusselfreiem Tuch entfernen. Teile ggf. desinfizieren, dabei besonders die Oberflächen beachten, mit denen der Nutzer/Betreuer in Kontakt kommt.

Ein- bzw. Auflagen und Bezüge können nach den Pflegehinweisen auf dem jeweiligen Waschetikett gewaschen werden. Ist kein Waschetikett angebracht, ist das Waschen des Gegenstands nicht empfohlen.

Polsterung: Polster dürfen nicht gewaschen werden. Ersetzen Sie die Polster, falls erforderlich.

Teilewaschanlage

Viele unserer Produkte können bei 60°C oder 85°C in einer Teilewaschanlage gereinigt werden. Bitte beachten Sie dazu die Hinweise in der Gebrauchsanweisung des Produkts.

Reinigungsmittel:

Verwenden Sie milde, scheuermittelfreie Reinigungsmittel mit einem pH-Wert von 5-9. Das Reinigungsmittel muss mit Wasser verdünnt werden. Die Mischung aus Reinigungsmittel und Wasser muss pH-neutral sein. Verwenden Sie keine säurehaltigen oder alkalischen Reinigungsmittel direkt auf den Materialoberflächen, um Beschädigungen zu vermeiden.

Desinfektionsmittel: Die Oberflächen können mit einer 70 prozentigen IPA-Lösung desinfiziert werden.

Hygienemaßnahmen

Was: Alle R82 Produkte

Wer: Händler, Besitzer, Betreuer und autorisiertes Servicepersonal

Wann: Nach Bedarf, bei regelmäßiger Wartung, Reparatur oder vor Wiedereinsatz

Maßnahmen: Wir empfehlen, bei Reinigungsarbeiten Schutzhandschuhe zu tragen. Stellen Sie sicher, dass kein Wasser in Leitungen, Lager oder Gestellteile eindringen kann. Alle verstellbaren Bauteile sollten vor der Reinigung auf Minimalposition des Verstellwegs eingestellt werden.

Wie: Oberflächen reinigen und anschließend mit trockenem, fusselfreiem Tuch oder Handtuch abwischen. Anschließend kann ggf. ein Lufttrockner bei niedriger Temperatur benutzt werden.

Desinfektion: Vor Desinfektion Rückstände und Schmutz mit in pH-neutraler Mischung aus warmem Wasser und scheuermittelfreiem Reinigungsmittel ausgewrungenen Lappen abwischen. Anschließend können die Oberflächen mit einer 70 prozentigen IPA-Lösung desinfiziert werden.

